



**ПРИБОР ОКРАСКИ МАЗКОВ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ  
«ПРОС-АП»-01 МИНИМЕД**

**ПАСПОРТ**

ТУ 26.60.12-025-29508133-2018

РУ № РЗН 2019/8155 от 27.02.2019 г.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

«Прибор окраски мазков – автоматический портативный «Прос-Ап»-01 МиниМед по ТУ 26.60.12-025-29508133-2018» (далее - изделие) предназначен для окраски мазков крови или других биологических препаратов на слайдах-предметных стёклах групповым методом. Предметные стёкла, размещенные в держателях – кассетах, опускаются в ванночки с реагентами, в которых выдерживаются в течении 5 мин. $\pm$ 10%. Основное применение изделия в лабораториях медицинских учреждений, диагностических центрах и медицинских научно-исследовательских институтах.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1 Электропитание изделия от сети переменного тока напряжением (220 + 10%) В и частотой 50 Гц. Потребляемая мощность изделия не более 330 ВА.

2.2 Производительность (60 $\div$ 120) слайдов/час.

2.3 Режим работы изделия – продолжительный. Допустимое время работы изделия в продолжительном режиме не менее 8 ч. Допускается до 12 рабочих циклов в час (равномерно по времени).


2.4 Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения или выхода изделия из спящего режима – не более 5 сек.

2.5 Средний срок службы – не менее 1 года. Полный средний ресурс – не менее 24200 циклов.

2.6 Габаритные размеры, мм: (450x300x170)  $\pm$ 5, (550x300x170)  $\pm$ 5 мм – с выдвинутым накопителем.

2.7 Масса изделия, не более, кг: не более 9,0.

Рис. 1. Внешний вид

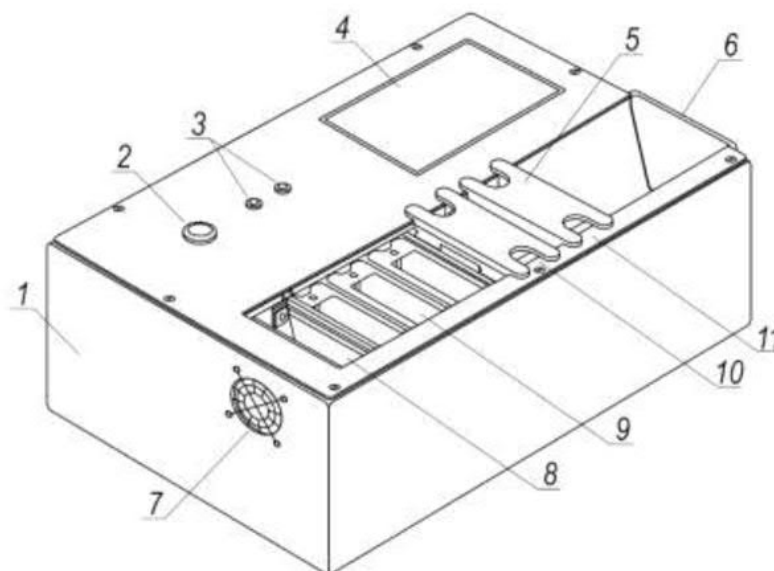

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 корпус;                    | 6 выдвигающийся накопитель;         |
| 2 сетевой выключатель;       | 7 вентилятор предварительной сушки; |
| 3 индикаторы состояния;      | 8 ячейка предварительной сушки;     |
| 4 краткая инструкция;        | 9 ванночки для реактивов;           |
| 5 кассета-держатель слайдов; | 10 ячейка основной сушки.           |
|                              | 11 ячейка выгрузки                  |

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

#### 3.1 Стандартная комплектность

Таблица 1

Наименование	Кол-во	Примечание
Прибор окраски мазков – автоматический портативный «Прос-Ап»-01 МиниМед	1 шт.	
Ванночка для реагентов	3 шт.	Длина 9,5см±5%, ширина 5,5см±5%, высота 7,5см±5%, масса 210г±10%.
Кассеты – держатели слайдов	5 шт.	Длина 12,5см±5%, ширина 4,5см±5%, высота 1,5см±5%, масса 35г±10%.
Руководство по эксплуатации	1 шт.	
Паспорт	1 шт.	
Слайды	50 шт.	Стекло предметное СО-4 со шлифованными краями и полосой для записи по ТУ 9464 – 012 – 52876859 – 2014 (ПУ №РЗН 2015/2981 от 26.12.2017г.), Длина, ширина - (26x76)±1 мм, толщина 2±0,2 мм, масса 9±1 гр.
Сетевой шнур	1 шт.	Длина 120см±10%, масса 100г±10%, сечение 3x0,5 мм <sup>2</sup>

### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 26.60.12-025-29508133-2018 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.2 Средний срок службы изделия должен быть не менее 1 года при средней интенсивности эксплуатации не более 8 ч в сутки.

4.3 В течение гарантийного срока предприятие-производитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие и его части по предъявлении гарантийного талона при выполнении следующих условий:

- направленное для гарантийного ремонта изделие должно быть укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- изделие должно быть чистым, продезинфицированным и не иметь механических повреждений.

### 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изделие изготавливает ООО «МиниМед».

Адрес производства: Россия, 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 1; Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

По вопросам, касающимся качества, следует обращаться в ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А; Тел. (4832) 92-97-97; E-mail: info@minimed.ru.

### 6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями, предусмотренными технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ М.П.

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_